



Linsenkappe der AccuLux Original LED entfernen.  
Zwischenstück mit dem Bajonettverschluß auf AccuLux drehen.

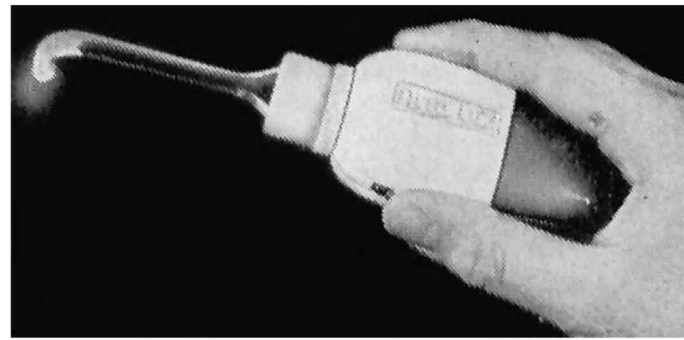

Zahnbetrachter gebrauchsfertig

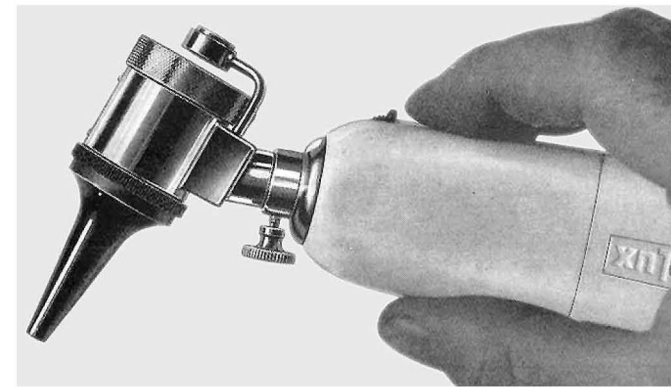

#### Entsorgungshinweis:

Die verbrauchten Akkus dieser Leuchte nicht in den Hausmüll werfen. Akkus geeigneter Sammelstelle zuführen.

#### Garantie:

Auf Material oder Verarbeitungsfehler gewährt der Hersteller eine Garantie von 24 Monaten. Verschleißteile wie Leuchtmittel und Akkus sind von der Garantie ausgenommen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt der Garantieanspruch.



**Witte + Sutor GmbH**  
Steinberger Strasse 6  
D-71540 Murrhardt  
Telefon 0 71 92 / 92 92 0  
Telefax 0 71 92 / 92 92 50  
Internet [www.acculux.de](http://www.acculux.de)  
e-mail [info@acculux.de](mailto:info@acculux.de)

## Bedienungsanleitung für das AccuLux Diagnostik-Otoskop- Set

Inhalt:

- Grundgerät AccuLux Original LED
- Otoskop-Stecker
- LED-Otoskop komplett mit 3 Trichtern
- 3 Mundspatel
- 3 Zahnbetrachter
- Zwischenstück für Mundspatel/Zahnbetrachter

Im Zuge der technischen Innovation wurde die Taschenlampe AccuLux-Original 70 durch die neue AccuLux Original LED ersetzt.

Dem anspruchsvollen Arzt bietet die neue AccuLux Original LED in der Kombination mit dem neuen AccuLux LED-Otoskop und dem Otoskop-Stecker ein vielseitiges, netzunabhängiges Instrument in der täglichen Praxis. Handlich und mit einem Griff kann die AccuLux Original LED bei der Untersuchung ganz einfach eingesetzt werden. Zusätzlich kann die AccuLux Original LED mit Mundspatel oder Zahnbetrachter anstelle des Oskops verwendet werden.

**Bitte beachten:** Das neue AccuLux LED-Otoskop funktioniert nur in Kombination mit der neuen AccuLux Original LED. Eine Verwendung zusammen mit dem Vorgängermodell ist nicht möglich.

#### Bitte unbedingt beachten:

Zur Desinfektion muß der Mundspatel bzw. der Zahnbetrachter vom Zwischenstück abgenommen werden. Zum Sterilisieren durch Auskochen nur destilliertes Wasser verwenden, damit sich keine Kalkrückstände absetzen. Bitte nicht mit Heißluft oder Dampf sterilisieren.


Zum Desinfizieren kann Baktolan bis 5%, Cefirol bis 5% oder Sagrotan bis 5% verwendet werden.

Mundspatel bzw. Zahnbetrachter nicht mit Weingeist behandeln.


Ein Einmal-Leuchtpatel ist in Vorbereitung.

#### Die Vorteile der AccuLux Original LED auf einen Blick:


- Die AccuLux Original LED besitzt ein dem Tageslicht sehr ähnliches Farbspektrum, wodurch eine natürliche und helle Farbwiedergabe der untersuchten Stellen gewährleistet wird.
- Die AccuLux Original LED leuchtet Flächen gleichmäßig aus.
- Mit einer einzigen Akkuladung der AccuLux Original LED ist ein Dauerbetrieb von >6 h möglich.
- Die NiMh Akkus der AccuLux Original LED sind bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar, weisen keine Tiefentladung auf und haben eine hohe Überladefestigkeit.
- Mit der AccuLux Original LED und ihrer LED-Technik sparen Sie außerdem Energie.
- Die LED ist langlebig, robust und stoßunempfindlich und hat eine Lebensdauer von weit über 50.000 Betriebsstunden.

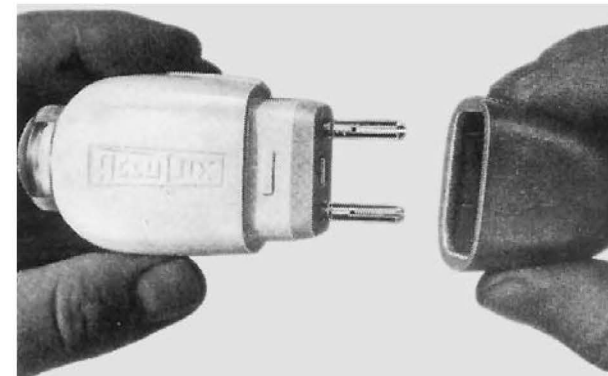


Kappe der Lampe abnehmen

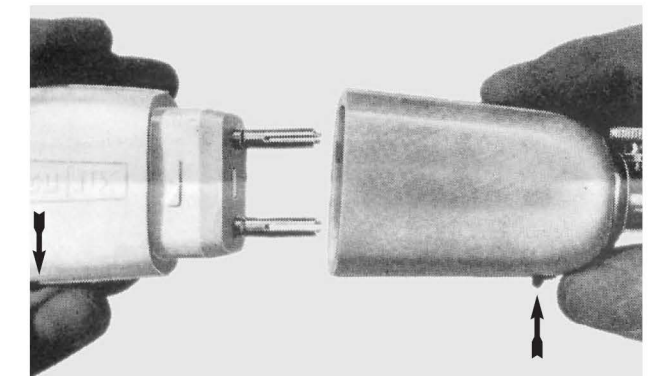

Otoskop-Stecker auf die Stifte aufsetzen.  
Bitte achten Sie darauf, dass sich die Ein-/Aussschalter immer gegenüberliegen.

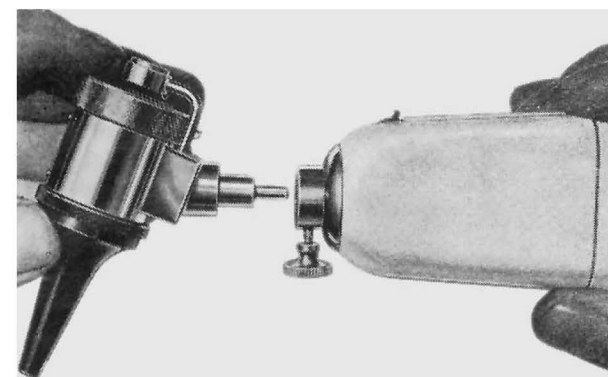

Otoskop einführen, Schraube festdrehen

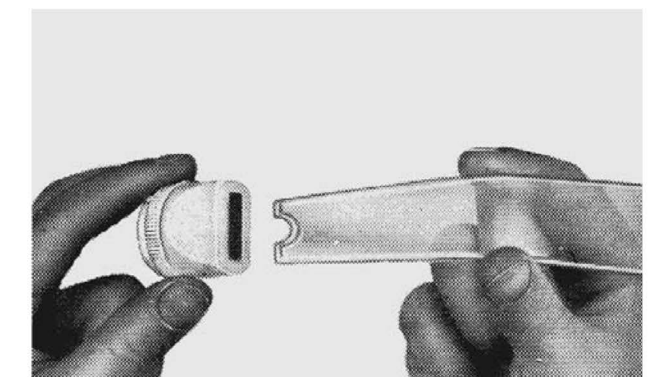

Mundspatel oder Zahnbetrachter in das Zwischenstück stecken.